

Anwendung erklärt anhand des AirOne Flex



Abb. 1
Kammer 1 mit Kontaktflüssigkeit befüllen.



Abb. 2
Kammer 2 (befüllt mit Inhalat) einsetzen.



Abb. 3
Nebelkammerdeckel aufsetzen.

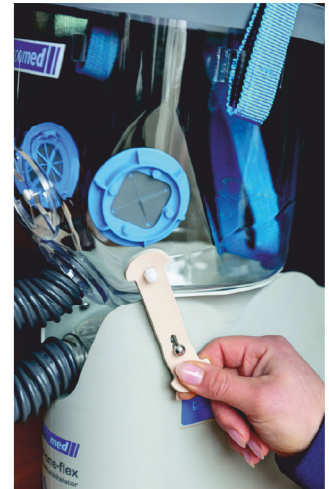


Abb. 4
Maske mit Gummilaschen befestigen und Verbindungsschlauch aufstecken.

Funktionsweise des Ultraschallverneblers

Die Funktionsweise des AirOne und des AirOne Flex ist identisch. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Geräten ist das Gehäuse und die Länge des Verbindungsschlauches zur Maske.

So einfach funktioniert es (am Beispiel des AirOne Flex).

Schritt 1: Befüllen Sie die Verneblerkammer **1** mit 60 ml Kontaktflüssigkeit **3** (Abb. 1).

Schritt 2: Befüllen Sie den Medikamentenbecher **4** mit maximal 50 ml und mit einer wasserlöslichen Inhalationslösung **5** gem. Beipacktext oder Rücksprache mit dem Tierarzt.

Schritt 3: Platzieren Sie Kammer 2 in Kammer 1 (Abb. 2) und setzen Sie den Nebelkammerdeckel darauf **6** (Abb. 3).


Schritt 4: Setzen Sie die Inhalationsmaske auf den AirOne Flex, indem Sie die rückseitige Lasche der Maske in die Aussparung am Gerät einsetzen und die Gummilaschen seitlich am Gerät befestigen **7** (Abb. 4).

Schritt 5: Verbinden Sie den kurzen Schlauch mit dem Ansatz des Nebelkammerdeckels und jenem der Maske (Abb. 4).

Schritt 6: Sofern der Akku des AirOne Flex vorher aufgeladen wurde ist er nun einsatzbereit.

- 1** Verneblerkammer 1
- 2** Schwingboden mit Quarz
- 3** 1. Kammer wird mit 60 ml Kontaktmittel befüllt
- 4** Kammer 2 (Verneblerbecher)
- 5** gefüllt mit Inhalat, z.B. Kochsalzlösung oder Herbal Liquid
- 6** Kammer 2 in Kammer 1 einsetzen, mit Nebelkammerdeckel verschließen
- 7** Maske sicher mit der Einhaklasche und Fixierbügel anbringen.

Aufgrund der hohen molekularen Dichte des Kontaktmittels kann die Schwingung, die der Quarz erzeugt auf das Inhalat übertragen werden. Das Inhalat wird zerstäubt.

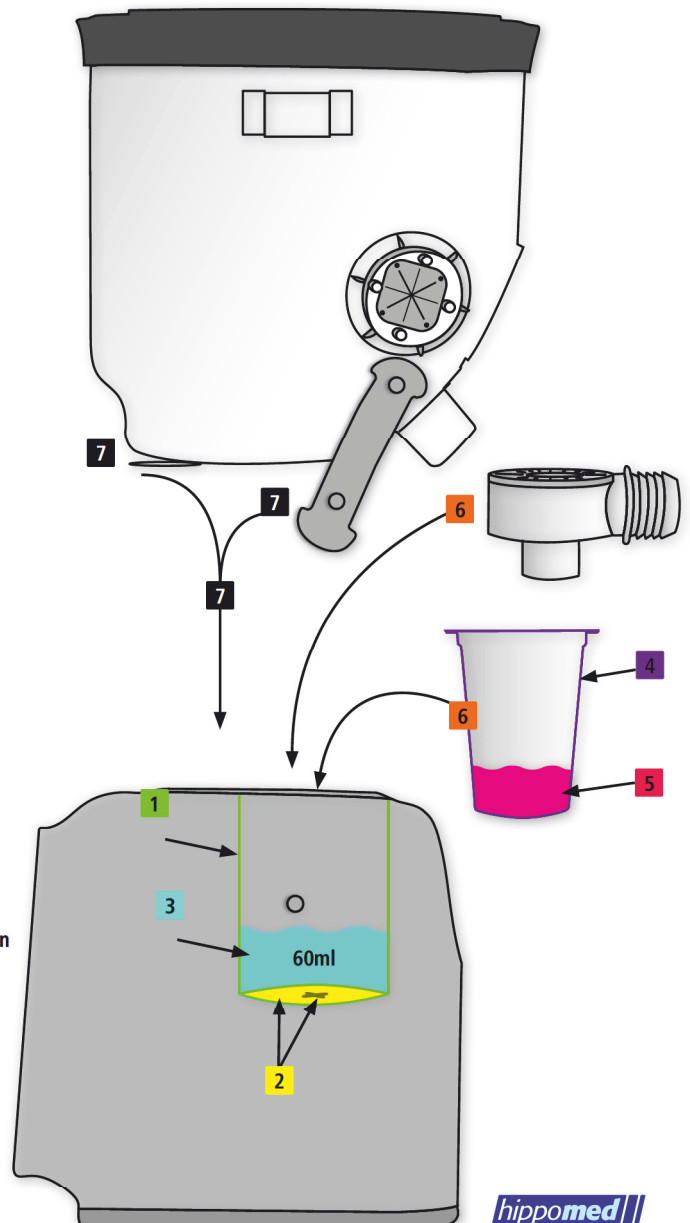

hippomed